


◆ 前日に過去画像を画像ビューアへ入れておきたい

日本医療ソフト株式会社
医療情報システムの未来を創造しています

翌日の健診者のID一覧を使用して、サーバーに対して過去2回分の画像を検索・転送指示する。
検索で該当した画像を受信し、画像ビューアへ配信します。

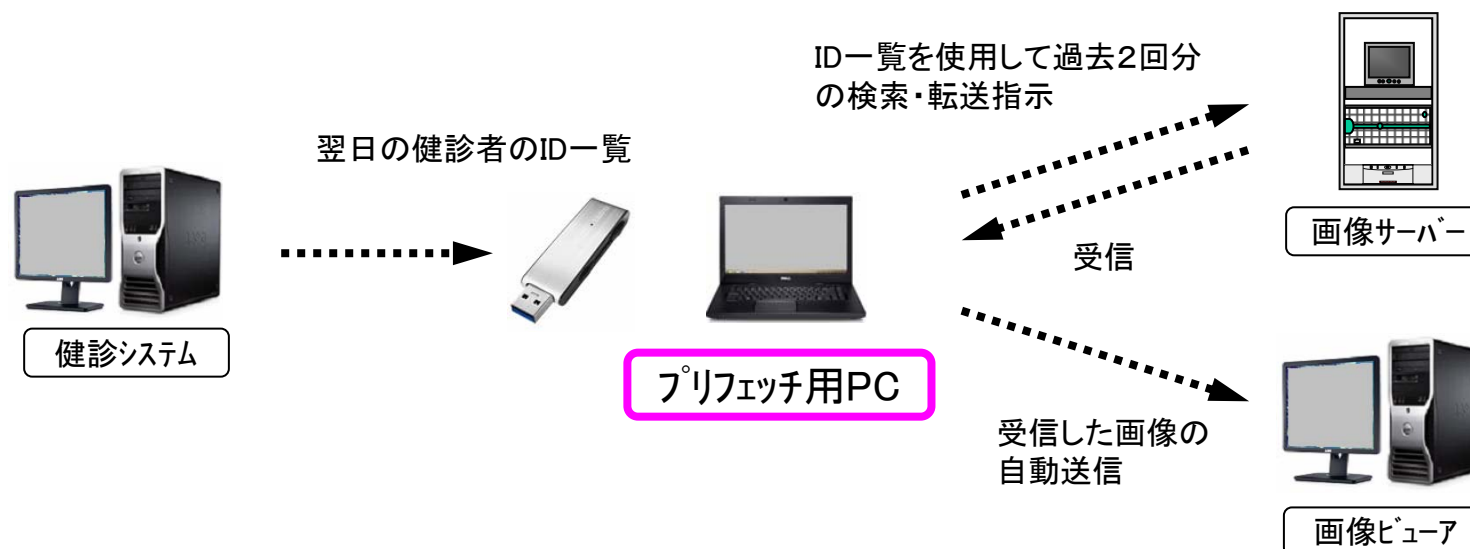

★画像サーバーが検索元にしか画像データを送信できないため、受信と送信が必要になりました。
一般的な画像サーバーであればプリフエッチソフトのみで対応可能です。

プリフエッチ用PC で使用するソフト

- ①プリフエッチソフト (製品名: DICOMスカウト)
画像サーバーに対して関連画像の配信を指示します。
- ②受信ソフト (製品名: DICOMキャッチャー)
画像サーバーから画像データを受信します。
- ③送信ソフト (製品名: DICOMピッチャー)
画像データを自動的に画像ビューアへ送信します。

ハードウェア

- ①ノートパソコン Windows8、7、XP
- ②LANケーブル カテゴリ-5e以上
- ③ハブ 1000Mbps対応